



使用說明書

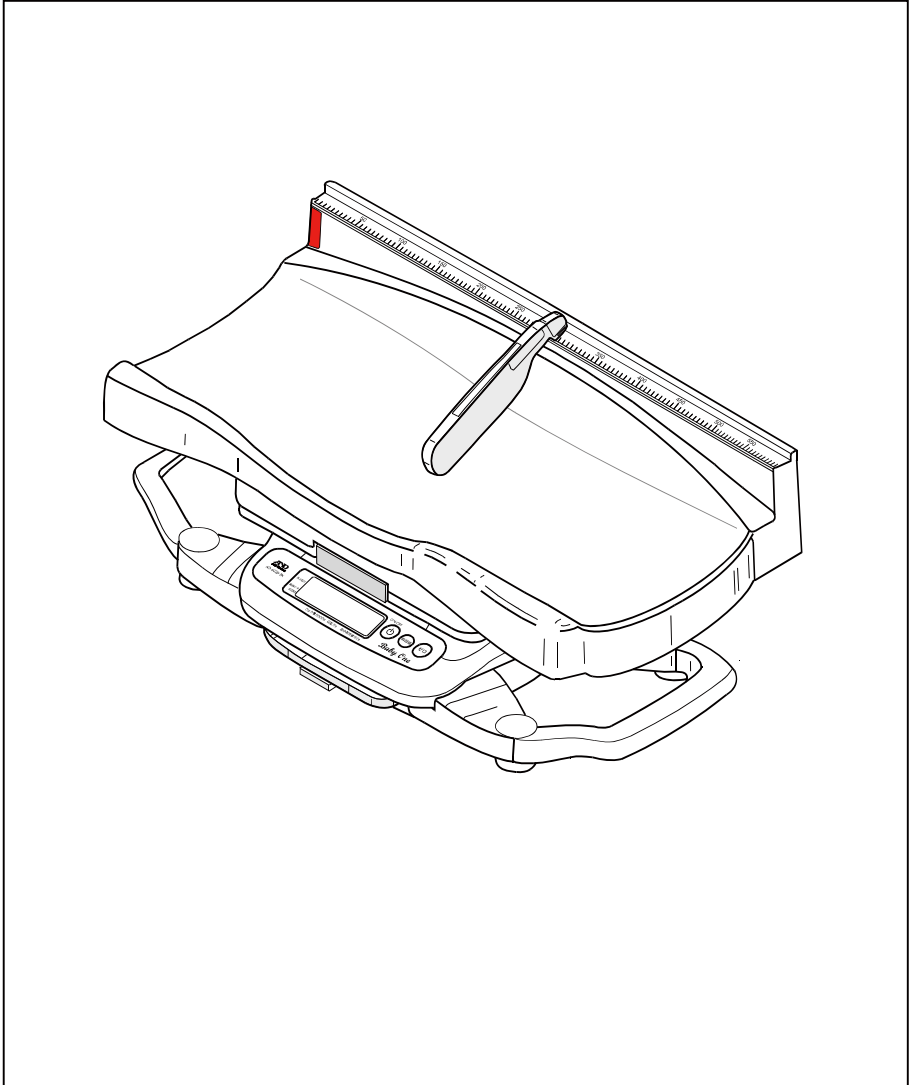


注意事項標示方法

在使用說明書及本產品上，為防止誤操作而發生危險，會標示警告標誌和圖形標示。警示和圖形標示的含義如下。

警示標示

 **危險** 此標誌表示，若無視此標誌誤操作，可能造成人員死亡或重傷的內容。

 **警告** 此標誌表示，若誤操作，可能造成人員死亡或重傷的內容。

 **注意** 此標誌表示，若誤操作，可能造成人員受傷或商品損壞的內容。

圖形標示



△ 記號為提醒注意（包含警告）的意思。
圖形中會記入具體注意事項（左圖為電擊注意）。



⊘ 記號為不可行事項（禁止）。具體禁止內容會在 ⊘ 的中間會記入文字或圖畫表示。左圖為「禁止分解」。



● 記號為必須遵守事項（強制）。具體的強制內容會在 ● 的中間會記入文字或圖畫表示。左圖為「遵守事項」。

其他






通知 對操作機器時有用的消息。

除此之外，也有個別的注意事項，請參照各頁的記載。






使用上（確保安全及防止危險）注意事項

為了正確安全地使用嬰兒體重計（AD-6020），請詳閱下列注意事項。除了安全操作機器外，也統整了關於檢測者與操作者安全的一般注意事項。機器特有的注意事項，會在接下來的文中敘述，請在使用前詳閱本使用說明書。




1. 機器的設置及保管，請注意以下事項

 危險	
	請勿攜帶進入含高可燃性的麻醉藥或引火性氣體儲放場所，及高壓氧氣室、氧氣帳等場所使用，可能引發火災爆炸。
 注意	
	請在下列的環境使用及保管。 <ul style="list-style-type: none">■ 不會淋到水的地方。■ 避免高溫、高濕的地方。無陽光直射、灰塵少，及避免暴露在空氣中含有鹽分、含硫量高的地方。■ 無傾斜、震動、衝撞(含搬運時)，無強風影響穩定的地方。■ 無儲存化學藥品或散發氣體的地方。■ 設置：溫度+10°C~ +40°C、濕度30%-85% RH（不結露）的地方。■ 保管：請避開溫度-10°C以下/+60°C以上、濕度95%以上的地方。■ 請準備對應機器電源（周波數、電壓、電流）的插座使用。■ 請避免於可燃性的麻醉劑等場所使用。
	本機為重物，在搬運或設置過程，請小心夾到手指。




2. 使用機器前請先確認以下事項

 警告	
	請使用100V~240V的AC變壓器。錯誤使用可能引發觸電及火災等危害。
 注意	
	<ul style="list-style-type: none">■ 機器安全且正確的作動。■ 所有的電線都正確且完全連接。■ 確認與鄰近的醫療用儀器沒有互相干擾的問題。■ 配件及與其他附屬品請詳閱各自附上的說明書後再使用，本說明書並無記載關於上述注意事項。■ 為確保能正確使用本機，使用前請務必實施啟動前點檢。■ 機器若有結露現象，請務必使其完全乾燥後才可接上電源。
	<ul style="list-style-type: none">■ 請勿在電源線上放置重物或在下方墊布巾等物品，可能導致觸電及火災。■ 專用AC變壓器本體、插頭等有破損時，請勿使用，可能導致漏電發生火災。■ 請勿使用本公司指定外之配件及耗材。



3. 使用機器時請注意以下事項

 注意	
	<ul style="list-style-type: none">■請全程留意機器運作情形及檢測者的狀況是否有異常。■使用時若發現機器及檢測者有異常時，請在安全狀態下停止機器等應變措施。
	<ul style="list-style-type: none">■請勿在強磁場及高電力的地方使用。■請勿使用原子筆等尖物押按顯示器的開關，可能導致故障。




4. 使用機器後請確認以下事項



 注意	
	<ul style="list-style-type: none">■按照規定的步驟，待操作鍵返回使用前的狀態後，再關閉電源。■配件等物品在清潔後，須妥善整理保管。■避免下次使用時無法測量，請於每次使用完後清潔機器。
	取下電線時，請勿以蠻力拔取。

5. 機器若出現異常，請依照以下方式處理



 警告	
	<ul style="list-style-type: none">■請確保檢測者(嬰幼兒)的安全。■停止機器動作、斷開電源、從插頭拔除電源線。■若機器顯示「故障」、「使用禁止」等，請盡速聯絡本公司。

6. 關於保養點檢時，請注意以下事項



 警告	
	<ul style="list-style-type: none">■日常清潔時，為避免觸電，請先切斷電源開關再拔除插頭。■長時間沒有使用，再次重新使用時，使用前請務必確認機器是否可正常運作。■為了安全並正確的使用，請務必實施啟動前點檢及保養點檢。機器的使用、保養的管理責任須由設置方(機構、學校、醫院、診療所等)負責。疏於啟動前點檢及保養點檢，可能導致事故。
	<ul style="list-style-type: none">■請勿分解、改造本機。■可能導致火災或觸電。

 注意	
	清潔時，請用乾燥柔軟的布擦拭本機。請勿使用稀釋劑、汽油等揮發性液體，以及濕抹布等擦拭本機。

7. 請注意強力電磁波，可能造成機器發生錯誤

 注意	
	<ul style="list-style-type: none">■若使用本機時，周圍有強力電磁波等存在，會有干擾波型及雜音，導致錯誤。若使用機器時，意外地發生錯誤，請檢查周圍環境是否有電磁波干擾，並採取必要的措施。 <p>下面為常發生的原因與採取措施的例子。</p> <ul style="list-style-type: none">■行動電話等的使用<ul style="list-style-type: none">因電波而造成的非預期錯誤動作。· 請指示使用者，在設置醫療用電器的房間或建築物內，請將行動電話或是小型無線機器關機。■藉由電源插座傳來其他機器的高週波雜音時<ul style="list-style-type: none">· 確認雜音，並設置雜音消除裝置等對策。· 使用可停止雜音的機器來消除雜音。· 更換其他插座取得電源。■在靜電影響的情況下（設備及其周圍環境的放電）<ul style="list-style-type: none">· 使用前，先將測試者及被測定者（嬰幼兒）進行放電。· 環境加濕。■雷擊影響<ul style="list-style-type: none">當附近發生落雷時，可能會對設備產生過大的電壓。此種情況下，請依照以下方式讓機器運作。· 使用無停電電源裝置（JIS T 0601-1可對應機種）。

8. 環境保護

 注意	
	<ul style="list-style-type: none">■丟棄本機時，請根據當地政府的回收計劃進行回收處理。■使用後的乾電池，請根據您所在城市的規定進行回收處理。 丟棄時請勿分類為可燃廢棄物，可能導致電池爆炸、火災等危險。

安全量測之警告及注意事項

量測相關警告及注意事項如下：

依據結果作自我判斷及治療行為具有危險性，請務必遵循醫師指示。

警告



- 請勿讓嬰幼兒俯臥進行測量，可能有窒息死亡的危險。
- 若有傳染疾病的嬰幼兒使用後的毛巾、毯子，請勿直接給下個嬰幼兒使用。為防止散播傳染疾病，毛巾、毯子等請常保清潔。
- 嬰幼兒在籃子時，請勿移動本機器，以免發生摔落等事故。



- 若有血液、藥劑、髒污附著時，為避免傳染疾病，請使用抹布沾取稀釋後的中性清潔劑擦除去。

警告



- 請勿讓嬰幼兒站著進行測量，可能有跌落危險。
- 請勿在無裝設籃子時進行測量，可能有被籃子底座尖銳處劃傷的危險。



- 請將機器設置在穩定、平坦、防滑的地方，以免發生跌落危險。
- 請讓嬰幼兒仰躺進行測量。
- 移動本機時，請確實握好本體兩端把手。若僅提起籃子移動本機，可能造成籃子脫落本體，導致受傷。

通知

測量範圍會因型號而不同。

項	目	AD-6020-12K
體重 (kg)	對象範圍	12 kg以內
身高 (cm)	對象範圍	58 cm 以內

檢定體重計

AD-6020是可以用來「交易」及「證明」用的檢定體重計。
檢定體重計的使用事項於本體側面銘板標示。

請詳閱以下注意事項，正確使用本產品。

※因身高量測在檢定項目外，故無法在「交易」及「證明」時使用。

■使用地區限制

本機器為特定體重計（相當於日本國內的精密等級：4）
可用於「交易」及「證明」用途且沒有使用地區的限制。

■最大秤量及最小測定量

在「交易」及「證明」中使用之「秤量」及「最小測定量」標示於銘板及顯示器。「交易」，於測量法中有「不問有償無償，以物品或勞役給付為目的的業務行為」之意。「證明」，在測量法中有「表明在公眾或商業上呈現公正事實」之意。


■溫度範圍

請在使用溫度範圍內使用本機。

■定期檢查

定期檢查詳細資訊請洽詢購買商家。

※本機在定期檢查時需要檢查台，如有需要請與我們聯繫。

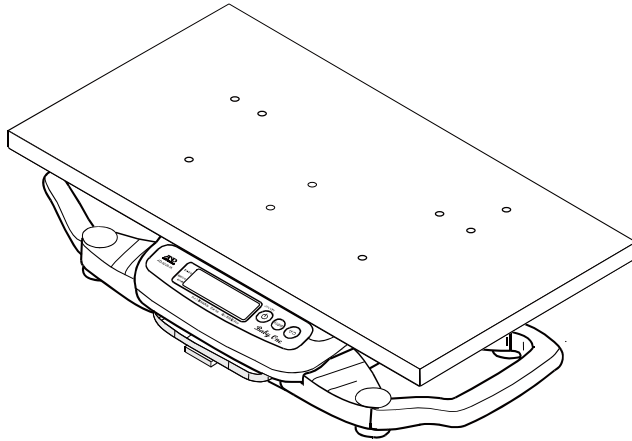

專用檢定台(日本國內適用)

■定期檢點

經長期使用，測量的精度可能會失準。建議定期點檢以維持性能之精確性。如有定期點檢需求，請與我們聯繫。

■體重計的校正

使用者無法自行完成「檢定體重計」的校正。

開箱

⚠ 注意



本機為精密儀器，請小心保管。強烈撞擊可能導致產品故障

通知

本機的特殊包裝設計雖可防止在運送過程中的撞擊，開封時，請確認產品是否有損傷。若產品發生損傷，請聯絡經銷商。此外，請保管產品外包裝材便於運送。

使用前，請確認本機與配件是否完整沒有缺漏損傷。

萬一，有產品缺漏或損傷的情形，請聯絡購買的經銷商或洽詢本公司。



配件請參照「配件表」。

□ 本體.....1組

- 本體(台座部) x 1個
- 籃子 x 1個

□ 標準配件組 專用AC變壓器.....1個

- 使用說明書(本書) x 1本
- 保證書 x 1部

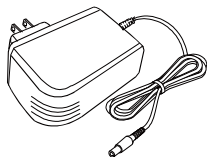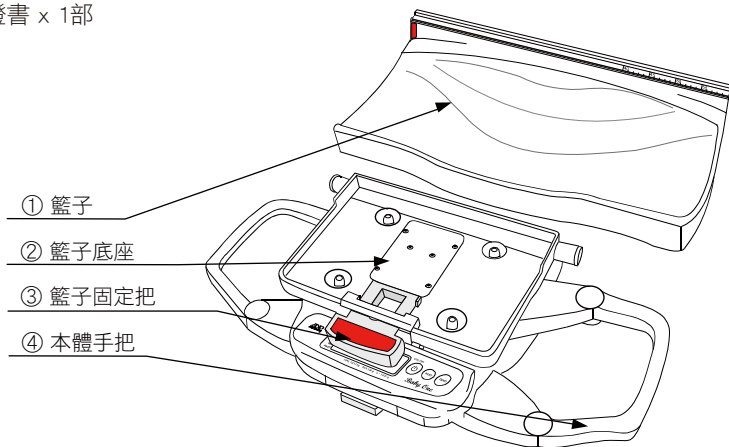

專用AC變壓器
(AX-TB266)



使用說明書(本書)



保證書

目 次

1. 簡介	9
2. 產品特色	
3. 省略語、記號說明	
4. 規格	10
4.1 構成	
4.2 本體規格	
4.3 外觀尺寸	11
5.各部位名稱	12
6.使用前準備	15
6.1 組裝方法	
6.2 準備電源	17
6.2.1 使用電池時	
6.2.2 使用專用AC變壓器時	
6.3 安裝	19
6.4 啟動前檢查	20
6.4.1 啟動電源前	
6.4.2 啟動電源後	
7.操作方法	21
7.1 測量嬰幼兒體重量	
7.2 測量扣去皮重的重量(減去毛巾等重量)	23
7.3 測量餵乳量	24
7.4 確認上次量測值	25
7.5 測量身高	
7.6 無須固定顯示量測值時	26
8.保養	27
8.1 保養檢查與安全管理	
8.2 清潔	
8.3 定期點檢	28
8.4 廢棄	29
8.5 送修前	
9.配件表	29
10.售後服務・保證	30
10.1 保證期間	
10.2 免責事項	
10.3 關於產品的常見問題・客服窗口	

1. 簡介

感謝您選擇A&D的嬰兒體重計（AD-6020）。本使用說明書介紹了AD-6020操作方法，維護和規格。使用前請詳閱本說明書，以便充分了解本機並使用它，請將其存放在隨時可以看到的地方。

2. 產品特色

■ 籃子全體可清洗

測量嬰幼兒的秤台為搖籃型、可讓嬰兒在平躺安心量測體重。

此外，籃子可輕鬆拆卸清洗，常保清潔。

■ 固定顯示機能

體重穩定顯示後，可固定顯示體重值。

將嬰兒緩慢地移到其他安全場所後，再紀錄量測值。

■ 體重增減的確認機能(餵乳量確認)

使用減去皮重的功能，利用體重的增減。確認餵乳量。





■ 上次測量值記憶功能

忘了紀錄上次體重值時，也可叫出上次測量值供確認。

■ 確認身高

籃子側邊有刻度及附有游標配件，可讓嬰兒在平躺安心量測身高。

3. 省略語・記號的說明

記 號	說 明
	表示 注意記號
	表示 AC變壓器接頭
	表示 電源ON、OFF(裝置的一部分)
	表示 參照操作說明書

4. 規格

4.1. 構成

搭載機能	型號	AD-6020-12K
數位LCD顯示		○
體重量測		○
減去皮重量測(淨重)		○
身高量測		○


4.2 本體規格

項目	AD-6020-12K
精度等級	4級
秤量	12kg
精度/感度	10g (0~10kg) / 20g (10~12kg)
最小測定量	100g
最大減算皮重量	9.99kg
最小表示固定量	1kg
身高測定範圍	40cm-58cm
顯示	7段LCD顯示 文字高25mm
顯示變更次數	約10次/秒
使用溫溼度範圍	溫度+10℃~+40℃ 濕度30%~85%RH (無結露狀態下)
保存溫溼度範圍	溫度-10℃~+60℃ 濕度95%RH
電源	專用AC Adapter或 乾電池 (一號電池-4入)
乾電池壽命	鹼性電池使用時 約800小時(20℃)*1
配件	AX-TB266專用AC變壓器
籃子尺寸	600mmX320mmX141mm
本體尺寸	628mmX343mmX245mm
本體重量	約5.0kg
耐用期間	設置後5年 A&D內部認證 (正常檢查等依照建議環境使用。根據實際使用狀況不同)
附屬品	專用AC Adapter (AX-TB266)、身長測量板、使用說明書、保證書
商品名	Baby One
型名	AD-6020


※1 依電池壽命、種類與周遭環境溫度而不同

4.3 外觀尺寸

本體

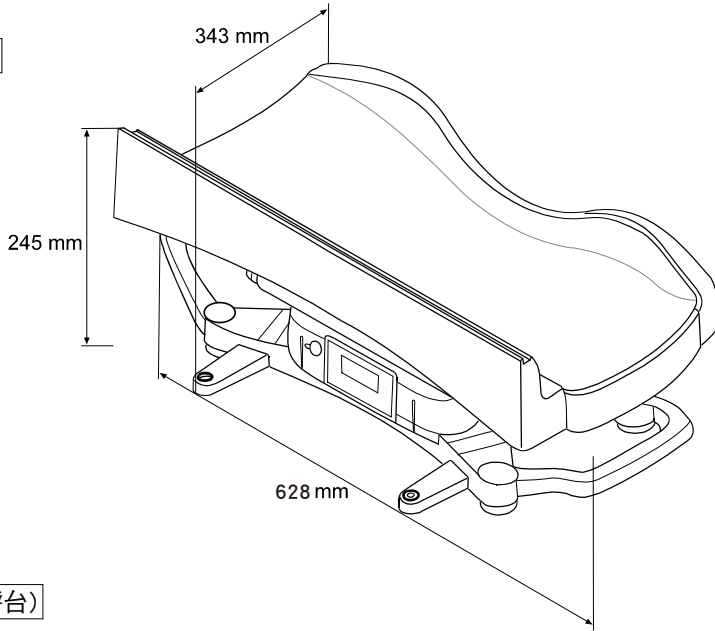


籃子(秤台)

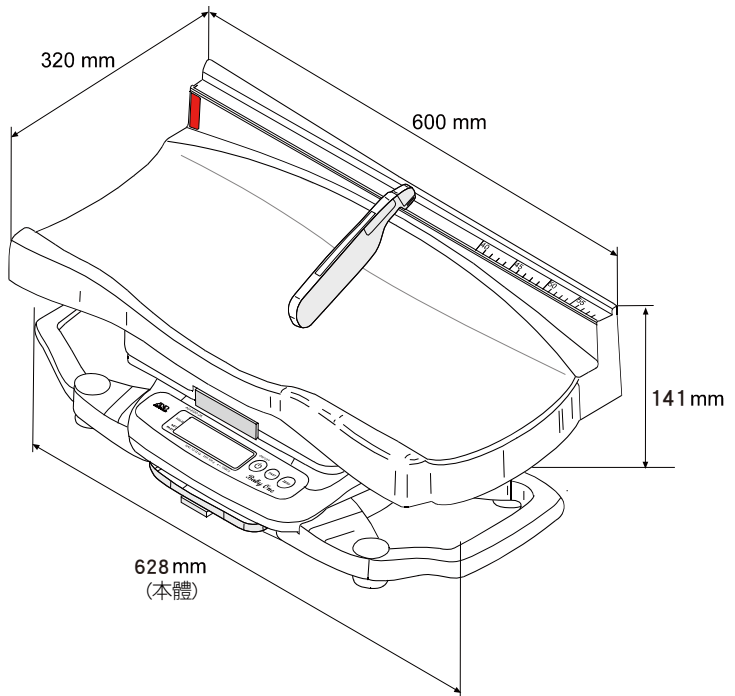


5. 各部位名稱

本體

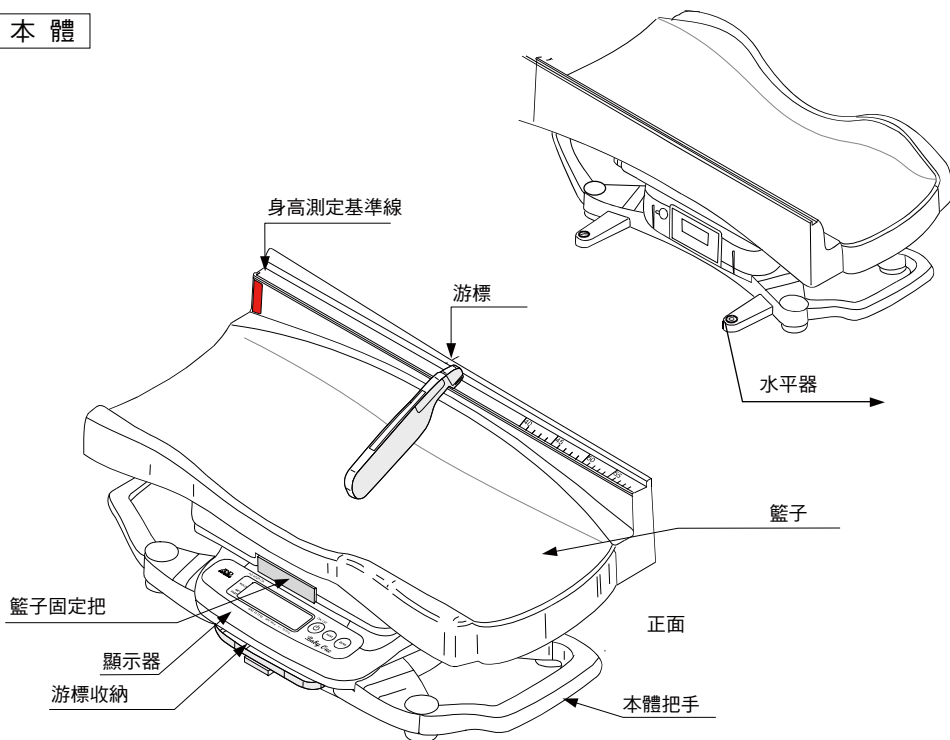



顯示部

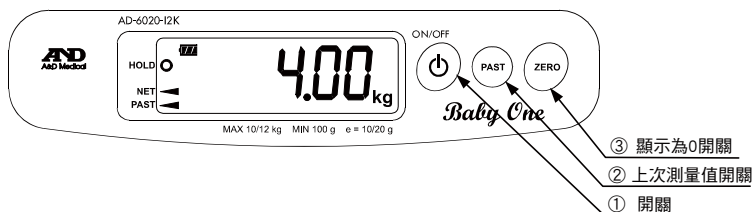


號碼	名稱	說明
①	開關	電源開/關
②	開關	顯示上次量測值。(顯示8秒) 即使切斷電源,也可保存上次量測值。 顯示上次量測值時,再按一次PAST按鍵即可回復量測模式。
③	開關	將顯示重量為0。(減皮重) 減去毛巾等重量、測量餵乳量時使用。

畫面

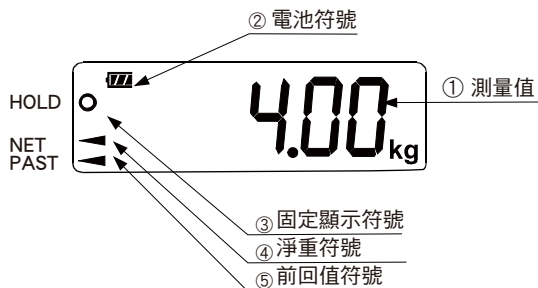

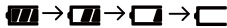
號碼	名稱	說明
①	測量值	顯示體重量測值
②	電池符號	使用電池時，可3段顯示剩餘電力。 顯示約30秒後消失。 
③	固定顯示符號	確定體重量後，固定顯示時亮燈。
④	淨重符號	減去一開始所量測重量(皮重)歸零後亮燈。
⑤	前回值符號	顯示上次量測值時亮燈。

籃子/本體

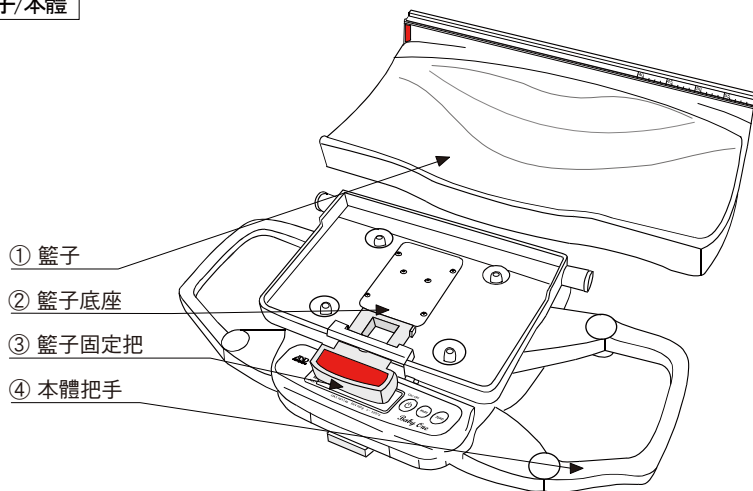

號碼	名稱	說明
①	籃子	可讓被測量者(嬰幼兒)躺著量測的籃子。
②	籃子底座	籃子固定在本體上的底座。
③	籃子固定把	固定住籃子。 壓下固定把，往前拉起即解除。
④	本體把手	移動產品本體時使用的把手。

身高測量部

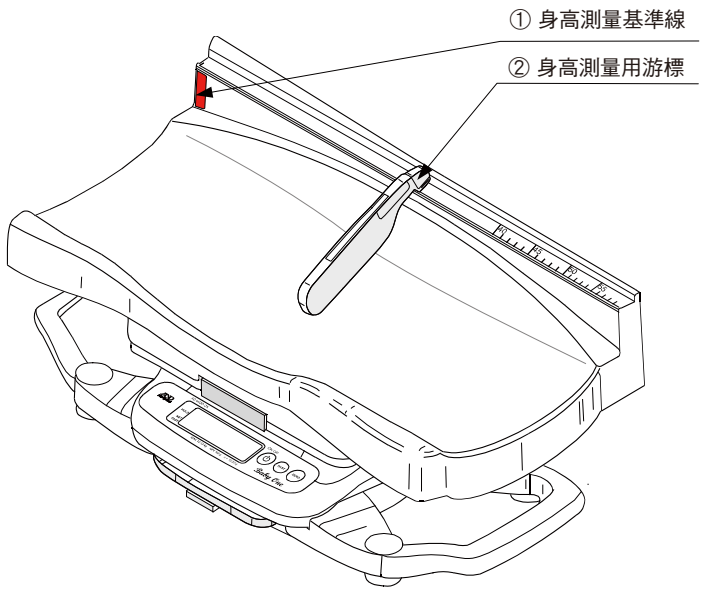

- ① 身高測量基準線
- ② 身高測量用游標

號碼	名稱	說明
①	身高測量基準線	量測身高時，將被測者的頭部對齊這條線。
②	身高測量用游標	量測身高時，被測者(嬰幼兒)的腳底板對齊這條線

6. 使用前準備

6.1. 組裝方法

警告




- 請勿放置在下列環境。
- 傾斜、震動、衝擊等不安穩的環境。
- 機器的支撐腳與籃子是否沒有破損等異常現象
產品可能翻覆或落下導致人員受傷或死亡。
- 籃子請確實固定在籃子底座上再使用。
若籃子脫落，翻覆或落下可能導致人員受傷或死亡。

注意




移動或設置時，請避免於本機籃子下方夾傷手指頭。


步驟1. 將籃子固定把往前拉出至看見紅色標籤。

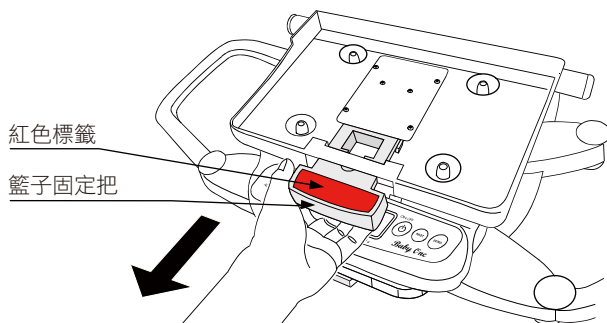


步驟2. 籃子如圖所示掀開立著，鉤子勾住籃子底座的裝置部

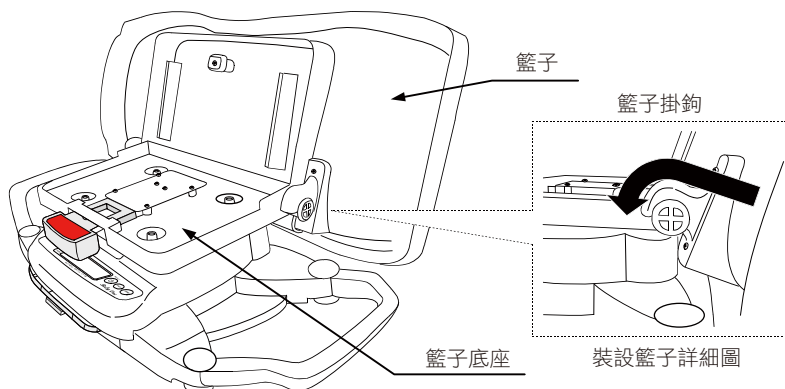


步驟3. 如圖所示讓籃子向前傾。

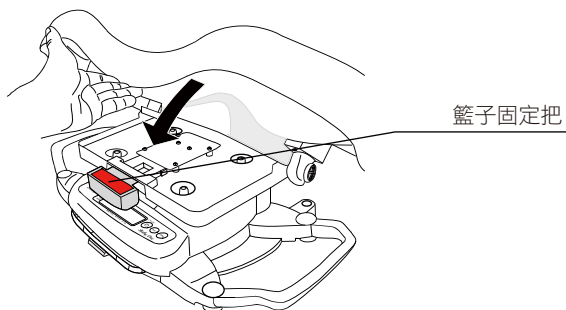


步驟4. 將籃子固定把壓入。

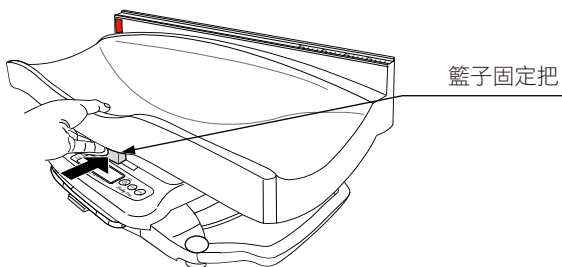

步驟5. 請確認籃子固定把的紅色標籤已完全看不見，即便從側邊籃子是否為水平狀態。

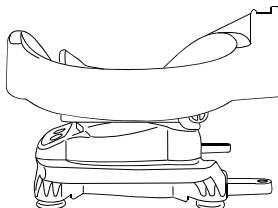

步驟6. 用手提起籃子確認，是否有穩固安裝上去。

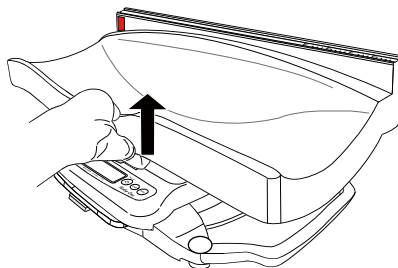

警告






請確認籃子是否有正確安裝。



若無正確安裝，可能發生受傷或死亡的危險。

- 籃子的方向是否正確、是否無傾斜。
- 籃子把手部的紅色部分是否完全看不到，正確固定。
- 用手上提籃子，確認確實固定。

6.2. 準備電源

6.2.1 使用電池時


 注意	
	<ul style="list-style-type: none">■ 請勿混用不同種類電池。■ 請勿混用新舊電池。
	<p>裝入電池時，請遵照正負極方向指示。</p> <ul style="list-style-type: none">■ 若長時間不使用，請將電池取出。長時間放置機內可能發生漏液，導致故障。■ 若不小心碰觸到乾電池的液體，請立刻以大量清水沖洗。■ 使用完的乾電池，請遵照所住地區規定分類回收。若分類為可燃物，可能會引發爆炸發生火災等危險。

通知	
<ul style="list-style-type: none">■ 電池符號若為  時，請替換為同種類4顆的全新電池。 電池完全沒電時，會顯示 Lb 與錯誤。■ 使用乾電池時接續AC變壓器，會使用AC變壓器供電， 電池符號會消失。■ 電池不包含在配件裡，請自行購買。	

步驟1. 將電池蓋下方滑開。

步驟2. 電池盒往上脫離本機，取出電池盒。

步驟3. 將新的電池1號乾電池4顆放入，請注意正負極方向。

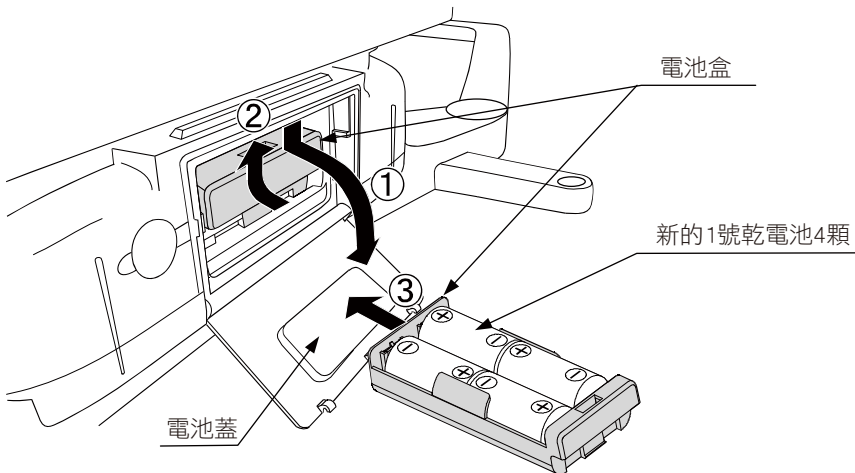

6.2.2 專用AC變壓器時




注意





- 請使用配件的專用AC變壓器(AX-TB266)。
可能發生火災或者是導致本機故障。

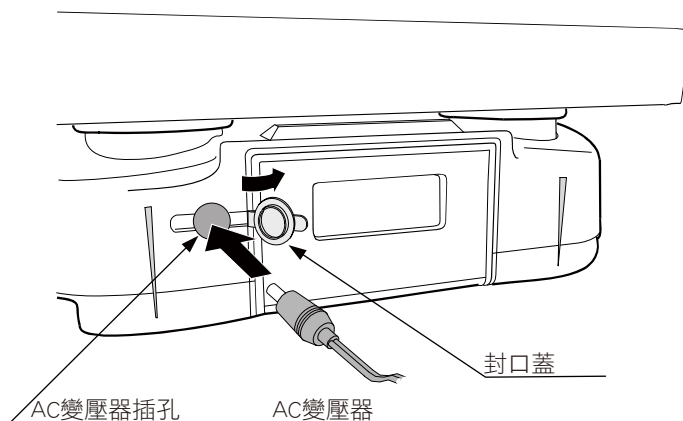步驟1. 打開封口蓋，插入AC變壓器




6.3. 安裝

警告


	<p>■請安裝在下列環境。</p> <ul style="list-style-type: none">- 無傾斜、震動、衝擊等安定的環境。- 機器的支撐腳、籃子穩定不搖晃、無破損 <p>若產品掉落恐造成人員受傷或死亡的危險。</p> <p>■籃子請牢靠的固定在籃子底座上</p> <p>若籃子掉落可能造成人員受傷或死亡的危險。</p>
	<p>■請勿將本機設置在桌子邊緣</p> <p>若本機掉落可能造成受傷或死亡。</p>

步驟1. 將本機如圖示般放置在平坦的地方。

若要設置在桌子上等較高位置，請像下圖般與桌緣保留適當距離。(建議20cm以上)

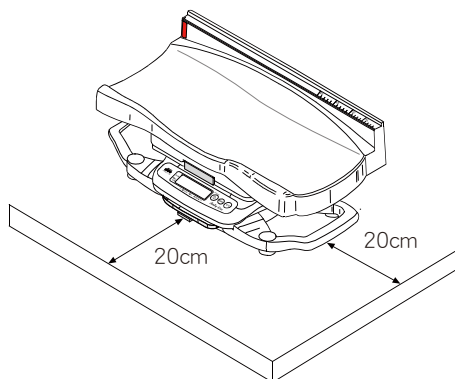

步驟2. 水平器的氣泡須在圓圈範圍中，並調整支撐腳高度使機台保持平穩狀態。

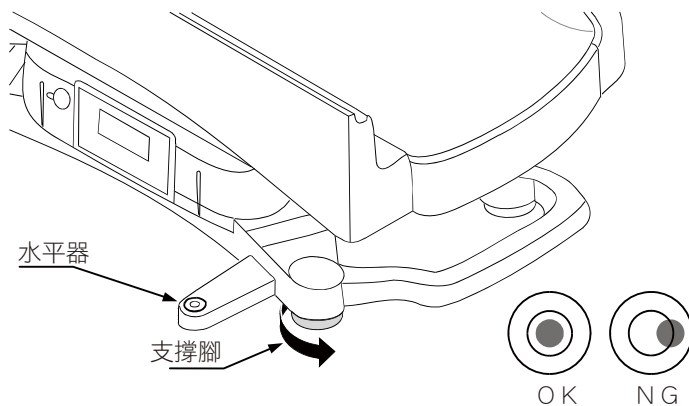

6.4. 啟動前檢查



警告



使用本機前，請務必實施啟動前檢查。

電源啟動前、啟動後請實施下列檢查後，請確認過後再使用。
若有異常發生，請立刻暫停使用，並在機上標示「故障」、「禁止使用」並聯繫本公司維修部門。

6.4.1 啟動電源前

號碼	項目	內容
1	周圍環境•安裝	設置在安穩平坦的位置 本體、設置處乾燥
2	外觀	沒有因為掉落等造成的變形或破損 表面沒有附著髒污血液
3	籃子	籃子沒有破損、割傷、突起 籃子固定把可確實固定籃子 表面沒有附著血液、藥劑、髒污等 (特別注意，嬰幼兒的嘴巴可能會接觸到籃子，請常保清潔)
4	AC變壓器	請確實插入本機的连接孔 電源線上沒有放重物、也沒有被壓在本機下方 電源線、插頭沒有破損
5	身高測量	測量身高的游標沒有破損 可正常裝卸游標 游標可順暢移動，測量身高

6.4.2 啟動電源後

號碼	項目	內容
1	啟動電源	沒有火花、冒煙、異味 沒有異常雜音
2	顯示	顯示無異常

7. 操作方法

警告



- 嬰幼兒在本機上時，請勿移動本製品。
- 本機使用時，視線請不要離開嬰幼兒。
嬰幼兒可能導致摔落受傷或死亡。



- 本機對嬰幼兒的身高及體重有限制量測範圍。請在測量範圍內使用。
若不遵守使用範圍，可能導致摔落受傷或死亡。
- 使用本機時，請小心不要讓嬰幼兒的手指夾在籃子的隙縫。
- 嬰幼兒在機上時，請務必仰躺量測。
若不遵守，可能會發生窒息、摔落等傷害或導致死亡。

通知

- 量測範圍根據型號不同。


項 目	AD-6020-12K
體重	12kg 以內
身高(cm)	58cm以內

- 畫面上的顯示及單位，根據型號而不同。


項 目	AD-6020-12K
單位	kg
表示	0.00

7.1. 量測嬰幼兒體重


- 步驟 1.  按下開關鍵

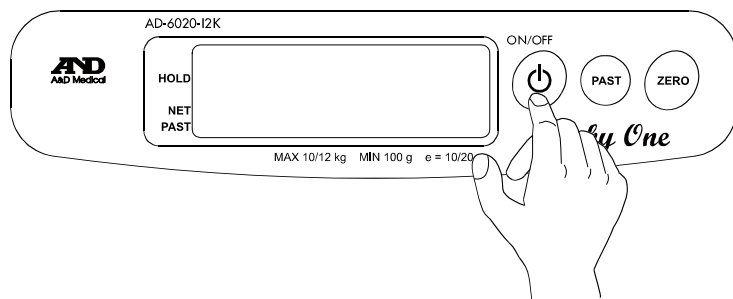


- 步驟2. 約一秒燈全亮

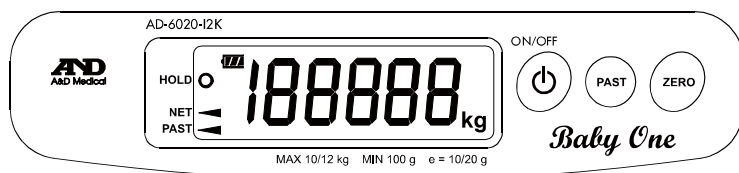


步驟3. 顯示為0.00時，即可開始測量。

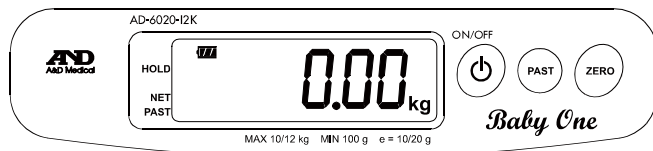

步驟4. 請讓嬰兒仰躺測量。

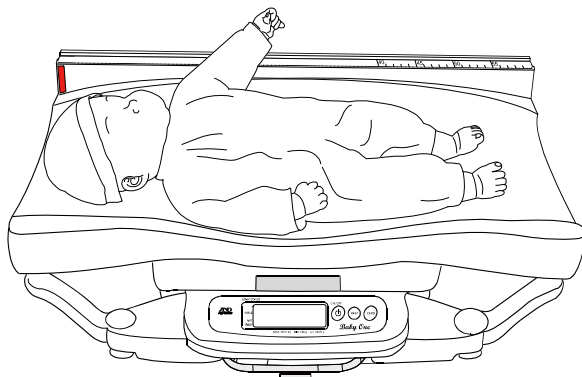

步驟5. 量測體重保持穩定時，「HOLD」燈亮，即固定量測值。顯示固定時，將嬰兒搬離量測台時仍可顯示。請先將嬰兒移到安全的地方，再記錄量測值。

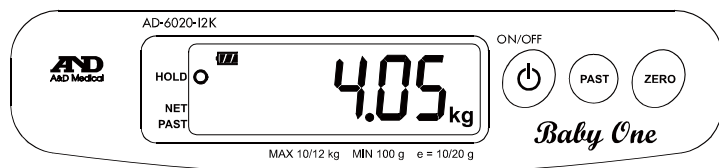

步驟6. 連續測量時，只要將下個嬰兒放在籃子中，即可解除上次的固定顯示，固定顯示新的量測值。

※將嬰幼兒放下約8秒解除固定顯示自動歸零。

※欲確認上次量測體重時，按下PAST鍵，即可顯示上次體重測量值。

(請參照「7.4確認上次量測值」)

※使用電池時，約顯示30秒電池符號。

7.2. 測量扣去皮重的重量(減去毛巾等重量)

即使在本機上放上毛巾、毯子等，也可減去其物品重量。

警告



■若有傳染疾病的嬰幼兒使用後的毛巾、毯子，請勿直接給下個嬰幼兒使用。為防止散播傳染病，毛巾、毯子等請常保清潔。



■請勿鋪設厚重毛巾、毯子。可能發生窒息的危險。

步驟1. 按下開關鍵。





步驟2. 約一秒燈全亮。

步驟3. 顯示為0.00時，即可開始測量。

步驟4. 在籃子裡鋪設毛巾或毯子。

步驟5. 按下ZERO鍵。

ZERO

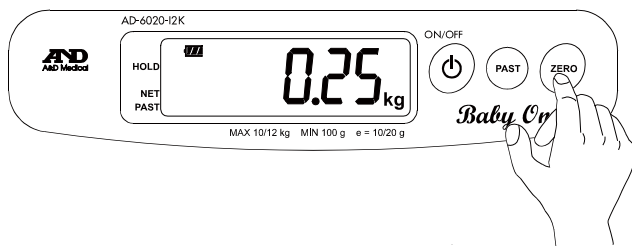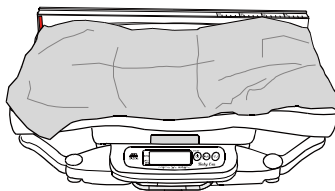


步驟6. 減去毛巾、毯子的重量，顯示為0.00。此外，毛巾與毯子的重量僅在240g(含)以上時，可啟動減去皮重(淨重)功能。

機種	毛巾與毯子的重量
AD-6020-12K	240g以上時



步驟7. 讓嬰幼兒仰躺在機上測量。

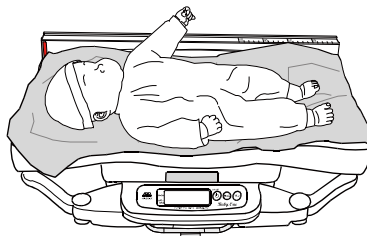

步驟8. 量測體重保持穩定時，「HOLD」燈亮，即固定量測值。固定顯示時，將嬰兒搬離量測台時仍可顯示。請先將嬰兒移到安全的地方，再記錄量測值。

7.3. 測量餵乳量

本機可以測量嬰幼兒的餵乳量。


步驟1. 按下開關鍵。

步驟2. 約1秒燈全亮。


步驟3. 顯示為0.00時，即可開始測量。

(到此皆與7.1操作相同)


步驟4. 讓嬰幼兒仰躺在機上測量。

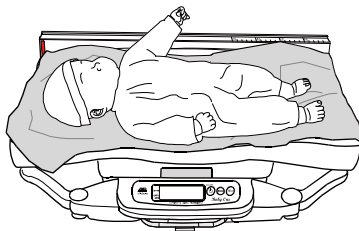

步驟5. 量測體重保持穩定時，「HOLD」燈亮，即固定量測值。固定顯示時，將嬰兒搬離量測台時仍可顯示。請先將嬰兒移到安全的地方，再記錄量測值。

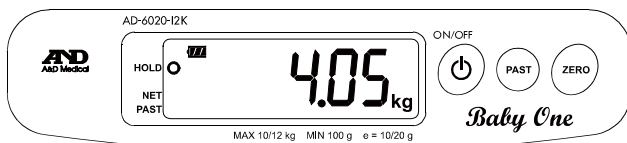


步驟6. 「HOLD」符號亮燈時，按下「ZERO」鍵，「NET」燈亮，顯示「0.00」

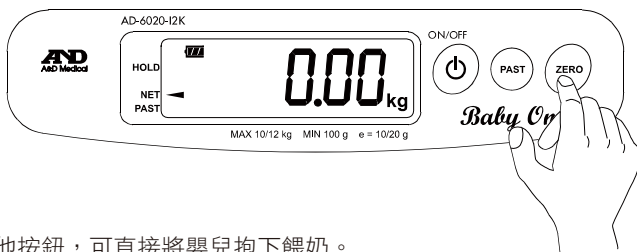


步驟7. 不須再按其他按鈕，可直接將嬰兒抱下餵奶。

步驟8. 餵奶後，請將嬰兒仰躺測量。

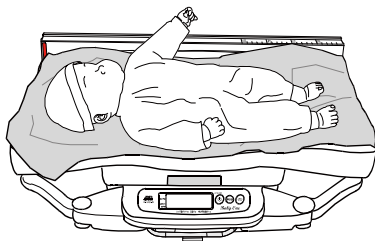


步驟9. 顯示數值即為餵乳量。

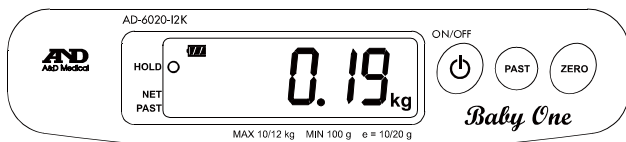

7.4. 確認上次量測值

本機可顯示上次嬰幼兒體重測量數值，可再次確認。

- 步驟1. 將嬰兒放在籃子中仰躺測量。
- 步驟2. 量測體重保持穩定時，「HOLD」燈亮，即固定量測值。(固定顯示時，將嬰兒搬離量測台時仍可顯示。請先將嬰兒移到安全的地方，再記錄量測值。)
- 步驟3. 體重值顯示8秒後，顯示「0.00」。
- 步驟4. 顯示「0.00」，請按下PAST鍵。
- 步驟5. PAST符號亮燈時，即顯示上次量測值約8秒。
- 步驟6. 顯示8秒後，顯示為0.00。

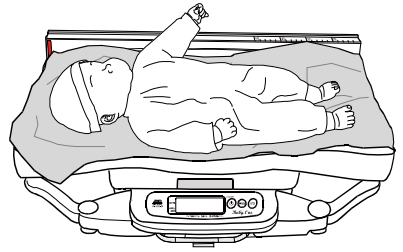


7.5. 測量身高

本機可使用身高測量用游標，讓嬰幼兒在籃子中即可測量身高，。
※身高量測為認證外，無法使用在「交易」或是「證明」。

通知

- 測量對象為下列的嬰幼兒。
身高：40cm-58cm以內

- 步驟1. 將嬰幼兒頭部靠著籃子中的身高量測基準線仰躺。
- 步驟2. 從本體下方的收納盒取出身高量測游標。
一併量測嬰幼兒的體重時，請參考「7.2測量扣去皮重的重量(減去毛巾等重量)」減去身高量測游標的重量。
- 步驟3. 身高量測游標請對齊嬰幼兒的腳踝，讀取顯示刻度紀錄身高。

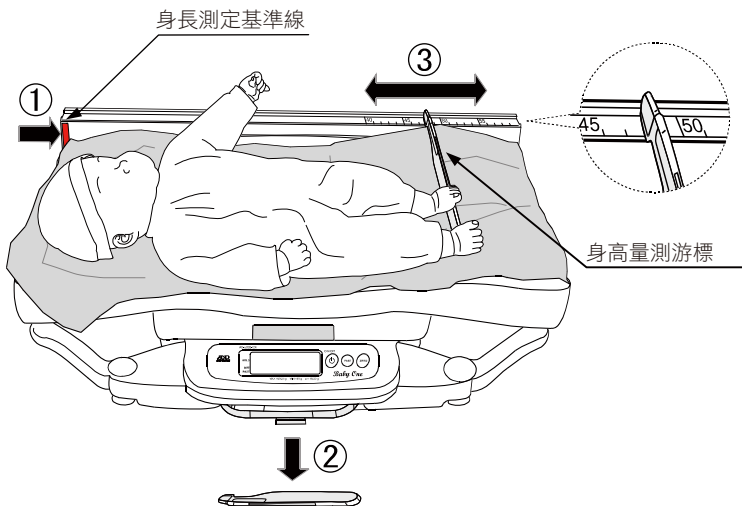


7.6. 無須固定顯示量測值時

檢查本機或保養時，無須固定顯示量測值。

步驟1. 同時按著PAST鍵與ZERO鍵，按下開關鍵。



步驟2. 顯示-----後，顯示0.00。

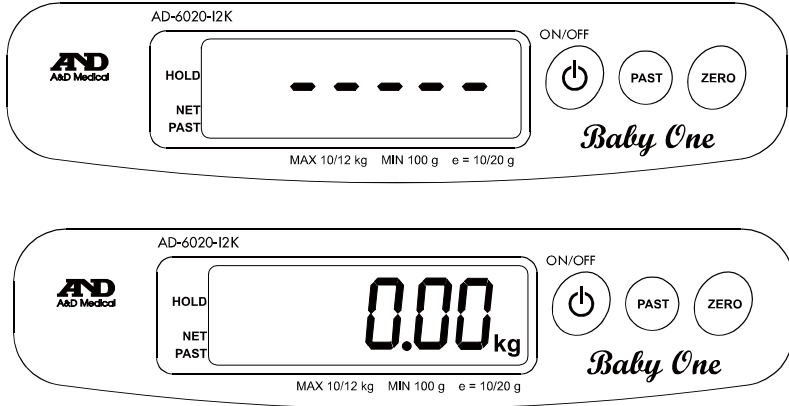

步驟3. 設定完後，就不會固定顯示量測值。

通知






- 不自動固定顯示量測值時，重新啟動電源即可回復初始設定(固定量測值)。

8. 保養

8.1. 保養檢查與安全管理

測量前實施日常管理，可維持機器性能、安全性等，請務必依循保養管理的規則。
關於「測量前檢查」等日常點檢管理，原則上應為操作者完成。
本公司建議一年至少實施一次的定期點檢。

8.2. 清潔

 警告	
	■ 籃子清潔後重新裝設在籃子底座時，請務必確實固定再使用。若籃子脫落，翻覆或落下可能導致人員受傷或死亡。
 注意	
	■ 清潔時，請務必斷開電源、拔出AC變壓器。 ■ 請勿以水沖洗本機。 ■ 本機殺菌時，請勿使用高壓滅菌器、氣體殺菌(EOG、甲醛氣體、高濃度臭氧等)。 ■ 請勿使用去漬油、汽油等揮發性物質清潔本機。 請依照機器的清潔或醫院訂定的清潔規範，參照下列方法，一個月 1次定期清潔本機。 ■ 清洗籃子時，為防止變形，請勿使用高溫水柱沖洗。
	■ 清潔時，請避免於本機籃子下方夾傷手指頭。

本體

外部髒污請用軟布乾擦除去。

清潔時，請使用稀釋後的中性清潔劑或消毒酒精。

若有血液、藥劑、髒污附著時，請使用抹布沾取稀釋後的中性清潔劑擦拭。

籃子

由本體取出籃子，籃子可以使用中性清潔劑清洗。此外，清洗完後，請確實風乾。

若要消毒籃子，請使用消毒用酒精。

特別注意，嬰幼兒的嘴巴可能會接觸到籃子，每日需保持清潔。

8.3. 定期點檢

為了能夠維持正確使用本裝置，請定期實施點檢。定期點檢的內容為下。

啟動電源前

號碼	項目	內容
1	外觀	沒有因摔落而造成的變形、破損 支撐腳沒有破損、搖晃，可水平安裝 各部位沒有髒污、生鏽、碰傷 面板部分沒有割傷、搖晃 本體與設置場所沒有沾到水 安全標籤與貼紙沒有脫落
2	操作部	開關、按鍵無破損或搖晃
3	顯示部	畫面沒有髒汙
4	籃子	籃子沒有破損、裂縫、突起等狀況 籃子固定把可確實固定在本體 籃子沒有搖晃 表面沒有附著血液、藥劑、髒污等 (特別注意，嬰幼兒的嘴巴可能會接觸到籃子，請常保清潔)
5	AC變壓器	本體的連接部可確實插入插頭 電源線上無放置重物，電線下方無墊布巾 電源線、插頭無破損
6	身高測量部	測量身高的游標沒有破損 可正常裝卸游標 游標可順暢移動，測量身高
7	機能動作	量測體重時，各按鍵都可正常動作

啟動電源後

號碼	項目	內容
1	外觀	無火花、冒煙、異味 無異常雜音
2	操作部	開關、按鍵類的作動無異常
3	顯示部	顯示裝置的符號、記號、數字等完整顯示
4	籃子	體重量測、各開關等操作正常動作

- 若機器發生異常，請提出點檢結果。
- 點檢時，請向住家本公司最近的營業處提出申請。

8.4. 廢棄




關於本機的廢棄或回收，請遵照所住地區規定分類處理。

品名	構成品	原材料
外包裝	箱 緩衝材 袋	紙箱 紙箱 塑膠(vinyl)
本體內部	外殼 內部部品 支架 基板上的電池	ABS樹脂 一般零件 鐵 電池
籃子	外殼	聚丙烯

8.5. 送修前

發現測量條件與機器異常時或顯示錯誤代號時，送修前，請先確認是否有符合下列表格的狀況。

若已經照下列方法處理，卻不斷重複出現錯誤，或是沒有改善，請與本公司ME機器客服中心聯絡。

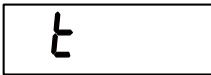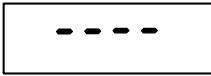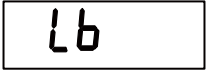現象	確認內容
	嬰幼兒的重量已超過最大秤量。請將嬰幼兒抱出籃子。
	啟動電源時，籃子裡是否承裝物體，請將之移除。
	電池已耗盡，請更換新電池。

警告



■請勿分解、改造本機。
可能會造成火災或觸電。

9. 配件表

電源關係

品名	型號
專用AC變壓器	AX-TB266

10. 售後服務·保固

本製品、配件與其他附屬品，為台澎金馬地區使用為主，保固僅在台澎金馬地區有效。

10.1. 保固期間

遵照使用說明書，與安全標籤等注意事項正常使用狀態下，保固期間如下：

- 本體……………自購買日起12個月
- 配件組……………自購買日起12個月

10.2. 免責事項

下列所記載的內容，本公司不負任何責任。

- 保養檢查或維修服務，使用本公司以外或指定的維修業者以外的公司。
- 沒有依循此使用說明書所記載的安全注意事項或操作方法等所造成的故障、損傷。
- 沒有依循此使用說明書所記載的電源、安裝、保管環境等所造成的故障、損傷。
- 疏於保養點檢，造成使用上發生的故障損傷。
- 本體以外的配件、耗材的故障及更換。
- 本公司以外的他社製品造成本公司產品損傷。
- 改造製品或不當修理造成的故障、損傷。
- 使產品掉落、誤操作等使用者自己的責任。
- 火災、地震、水災、雷擊等天災造成的故障、損傷。

10.3. 關於產品的常見問題·客服窗口

- 請根據內頁記載的窗口洽詢。

店章蓋印處

年 月 日

- (1)嚴禁轉載本說明書。
- (2)本說明書內容若有變更，恕不提前通知。
- (3)本說明書內容雖經過萬全的審核，但若發現漏記或錯誤資訊，請聯絡本公司。
- (4)不受第三項內容之所限，其衍生責任本公司概不負責

©2008 A&D Company, Limited

在未經過A&D Company, Limited的允許，不得自行對本說明書進行複製及修改。

本說明書中記載的商品名及公司名，已在日本國內及其他國家進行商標登錄。

製造商
A&D Company Limited.
販賣商

AND 株式會社 **エーアンド・デイ**

本社：〒170-0013 東京都豊島区東池袋3丁目23番14号

總代理  杏豐實業股份有限公司
SUN•UP HEALTH CARE CO., LTD.

www.sunup-hc.com.tw
服務專線：02-66358858



* 使用時請參照使用說明書

* Copyright © 杏豐實業股份有限公司，All Rights Reserved.

* 本內容以官網公告為主，如有更改不另行通知，杏豐保留活動變更、終止之權利

A&D_AD6020-guideline-CHT-v1.0