

Technology You Can Trust

**AND**  
A&D Medical

# 床旁體重計

## AD-6121A

輕量小型，方便使用。



刻 度 : 100g  
秤 量 : 150kg  
使用地域指定 : 要

精度等級  
3級

# 設置、收納皆方便的輕薄型體重計 隨時隨地可以帶著走。

可放置於床旁使用的體重計。  
薄型、輕量、易收納，是目前市場上少見的規格及低價。  
醫院、學校、健檢中心、體育館、美容中心等場所皆能使用。



## new form

重量約3Kg、可輕鬆手持

拿取、移動時輕鬆方便。

本體體積315×314mm

輕薄體積，不佔設置及收納空間。

測量台高度57mm

在狹窄的縫隙間也能直立收納。

減少抬腳的負擔。

可收納至床底下。



## AD-6121A

目量 (最小表示) : 100g  
秤量 (最大計量) : 150kg  
使用地域指定 : 要  
使用地域 (都道府名) 指定。

取引・証明用  
検定付

精度等級  
3級

## 顯示方向切換

健診時便利的對向顯示功能。  
本體背面有切換鍵，可切換數據顯示方向。



標準顯示（個人測定時）



對向顯示（健診時）

## 背光顯示

在昏暗處也能清楚看到數據。

（只限 AC變壓器使用時）



## 水平調整

藉由椅腳及水平器，可調整機體的平衡，  
使測量能夠準確。



## 嗶嗶聲

電源啟動及測量完畢的通知聲。  
（也可關閉此功能）



## 使用方法切換（顯示固定）

用途（個人、健檢、測量）3種顯示  
固定切換。

模式	顯示固定
個人	5秒內顯示(離開測量台後)
健檢	±3Kg以內的變動固定
測量	不固定

## 2種電源方式

在不同用途及場所中，可使用3號電池4顆或  
是專用AC 變壓器兩種方式。

（3號鹼性電池使用回數：約1,000回）

## 扣除皮重(測量淨重)

測量時，將外物放上體重計並按下歸零鍵，  
顯示0時，即完成皮重設定。

## 自動關機

2分內無操作電源將會自動關閉，以防止電  
源消耗。（使用AC變壓器時無此功能）

## 通訊功能

附擴充端子（RS-232C）1ch，可接續電腦。

別售：通訊連接線 AX-KO2238

（DOS/V用RS232C連接線、D-sub9轉接頭、長度2m）



## 手提箱（另售）

方便提取的手提箱。

別售：AD6121-01



## 使用場所



床旁測量  
病房・門診



健檢測量  
學校・健診



營業場所  
體育館・美容美體中心




※ 也可用於一般物品或行李的測量。



## 規格

品名	床旁體重計
型名	AD-6121A
最大秤量	150kg
精度/感度	100g
使用範圍	2kg~150kg
最大減去皮重量	150kg
螢幕顯示	液晶、背光顯示（僅在AC變壓器使用時有此功能）
電源	AC變壓器（AX-TB266）或3號鹼性電池4顆
聲音	附ON・OFF鍵
外觀尺寸	315（W）×314（D）×57（H）mm
重量	約3kg
標準配件	AC變壓器（AX-TB266）、使用說明書、保固書
商品 Code	AD6121A
JAN Code	4981046700689

## 外觀尺寸單位：mm

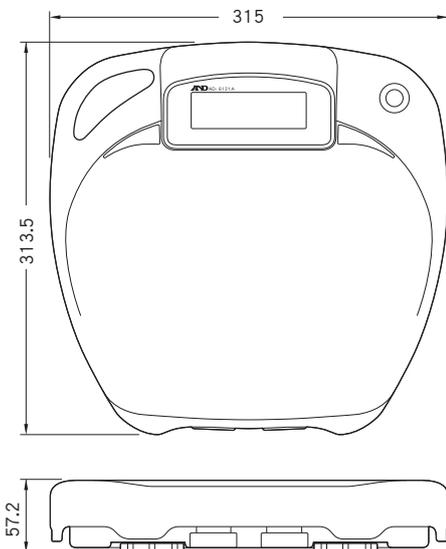

## Option



通訊連接線

AX-KO2238

JAN Code 4981046710657

AC變壓器

AX-TB266

JAN Code 4981046618076

手提箱

AD6121-01

JAN Code 4981046712224

## 使用地域區分

若涵蓋在兩處的縣市、可任用其中重力加速度的範圍。

使用地區 重力加速的數值	分類	台灣使用地區
9.790m/s <sup>2</sup>	1	台北
9.789 m/s <sup>2</sup>	2	台中
9.788 m/s <sup>2</sup>	3	台南、高雄

在台灣重力加速度的資訊如下：(參考網站如下)

<https://www.sensorone.com/local-gravity-calculator/>將緯度(Latitude)及高度(Height)資料輸入,即可查詢置放體重計區域的重力加速度資訊。

\*請注意：台南、高雄區域為設定範圍外,但誤差小於0.1%。

販売元  
**AND** 株式会社 エーアンド・ティ

本社:〒170-0013 東京都豊島区東池袋3丁目23番14号  
TEL.03-5391-6127(直) FAX.03-5391-6129

■札幌出張所 TEL.011-251-2753(代) FAX.011-251-2759  
■仙台出張所 TEL.022-211-8051(代) FAX.022-211-8052  
■名古屋営業所 TEL.052-726-8763(直) FAX.052-726-8769  
■大阪営業所 TEL.06-7668-3904(直) FAX.06-7668-3901  
■広島営業所 TEL.082-233-0611(代) FAX.082-233-7058  
■福岡営業所 TEL.092-441-6715(代) FAX.092-411-2815

<http://www.aandd.co.jp>

總代理



杏豐實業股份有限公司

SUN-UP HEALTH CARE CO., LTD.

[www.sunup-hc.com.tw](http://www.sunup-hc.com.tw)

服務專線：02-66358858

\* 使用時請參照使用說明書 \*Copyright © 杏豐實業股份有限公司, All Rights Reserved.

\* 本內容以官網公告為主,如有更改不另行通知,杏豐保留活動變更、終止之權利



AND\_AD6121-qr-code-line-CHT-v.1.0