

全自動身高體重計

AD-6228AP

取引・証明用
検定付

精度等級
3級

無障礙規格
安全測量，省力搬運
薄型50 mm
全自動身高體重計



Stature & Weight

全自動身高體重計 AD-6228AP 內含列印功能

踏上測量台後，自動開始測量體重，待測量值穩定後，上端測量板會下降至頭頂測量身高。身高、體重同時測量，並顯示「身高」、「體重」及「BMI」數據。

測量

無障礙規格

測量台離地高50mm，搭配扶手使用，可以輕鬆無負擔地踏上測量台進行體重量測。

附扶手

可握著扶手安全、安穩地進行量測。

測量模式切換

「身高・體重」「體重」「身高」等，可切換各種測量模式

測量完後，嗶嗶聲通知

各模式測量完成後，會有嗶嗶聲通知

身高測量部的高度三段調節

測量身高時，可配合測量範圍更改支柱高度，以便能快速測量。



範圍1

60.0~160.0cm

範圍2

100.0~200.0cm

範圍2

120.0~220.0cm



螢幕

減算皮重設定(扣除外衣重量)

通過螢幕的按鍵操作，您可以設定預設皮重重量以100克單位，最大設定可達200公斤

內附高速列表機（僅AD-6228AP）

快速印字功能、使用58mm寬感熱用紙、並附有自動裁紙器。

2017/06/01 03:00
身長 165.2 cm
体重 (N) 60.0 kg
風袋 (PT) 1.0 kg
BMI 22.0

(N) : 正味量 NET
総量から風袋量を差し引いた
正味の質量です。
表示している体値は
風袋を差し引いてあります。

(PT) : プリセット風袋 PresetTare
事前に把握している
着衣などの質量を
風袋設定した値です。



搬運

附大型滾輪，可輕鬆搬運

可收起身高測量部的伸縮桿、
利用滾輪及扶手，可輕鬆移動體重計。



擴充

擴充端子連結系統對應

為了能夠連結健檢中心或醫院內的LAN等各系統，
外部入輸出（RS-232C）以標準2ch裝備、條碼機(指定品)連結，在列印測量結果時，也能輸出ID。

ID 1234567890123456
2017 /06/01 03:00
身長 165.2 cm
体重 60.0 kg
BMI 22.0

Sensor

薄型重量Sensor

使用新開發的薄型、高性能的重量感測器，使測量台達到超薄設計。感測器分布在測量台四周，無論站在哪個位置，都能準確地測量。

正確




規格


品名	全自動身高體重計	
型號	AD-6228AP	
體重測量部	精度等級	3級
	最大秤量	200kg
	刻度/精度	100g
	擴充顯示	20g
	最小測重	2.0kg
	最大減算皮重	200.0kg
	顯示	7 段 LED 文字高14.2mm 6位
	測量台尺寸	400 (W) × 340 (D) mm
身高測量部	測量範圍	範圍 1 : 60.0~160.0cm 範圍 2 : 100.0~200.0cm 範圍 3 : 120.0~220.0cm
	最小表示	0.1cm
	顯示	7 段 LED 文字高14.2mm 4位
	精度	± 2 mm
全體	BMI表示	7 段 LED 文字高14.2mm 3位
	時間表示	7 段 LED 文字高10.0mm 4位
	使用溫濕度範圍	溫度: +5~+35℃ 濕度: 85%RH以下 (無結露時)
	電源	AC100-240V 50- 60Hz 50VA
	本體外觀尺寸	範圍 1 : 400 (W) × 608 (D) × 1750 (H) mm 範圍 2 : 400 (W) × 608 (D) × 2150 (H) mm 範圍 3 : 400 (W) × 608 (D) × 2350 (H) mm 收納時: 400 (W) × 608 (D) × 1535 (H) mm
	本體重量	約32kg
	外部輸入輸出端子	RS232C 2ch
	配件	電源線、接地變壓器、螢幕支架、 附屬螺絲M4 (2顆) 使用說明書、 感熱紙 2卷 (AD-6228AP)
	商品 Code	AD6228AP
	JAN Code	4981046701044

耐用期間：設置後5年透過A&D數據自我認定
(此為在常規維護等的環境下使用時的數據。根據使用狀況可能有差異。)

■ 本體

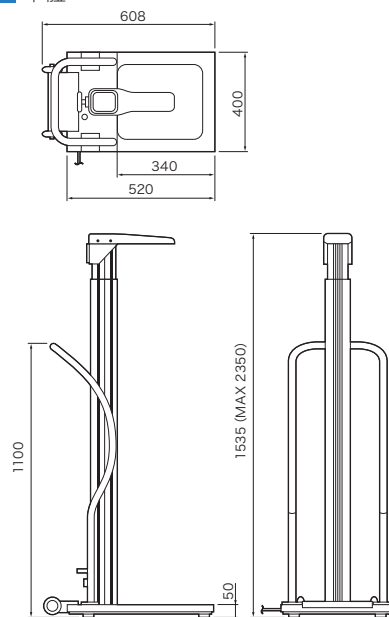

■ 螢幕

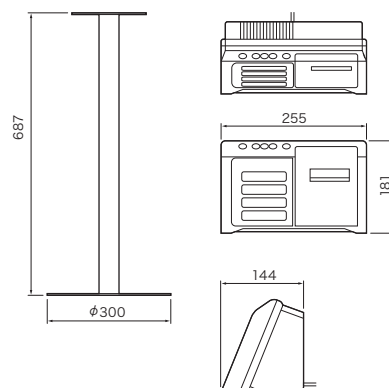

Option



感熱紙 (5卷/箱)
AX-PP147-S
紙幅58mm 長30m
JAN Code : 4981046711340



電源連接線
AX-KO115
JAN Code : 4981046712941

使用地域區分

若涵蓋在兩處的縣市、可任用其中重力加速度的範圍。

使用地區 重力加速的數值	分類	台灣使用地區
9.790m/s ²	1	台北
9.789 m/s ²	2	台中
9.788 m/s ²	3	台南、高雄

在台灣重力加速度的資訊如下: (參考網站如下)

<https://www.sensorson.com/local-gravity-calculator/> 將緯度 (Latitude) 及 高度 (Height) 資料輸入, 即可查詢置放體重計區域的重力加速度資訊。

*請注意: 台南、高雄區域為設定範圍外, 但誤差小於0.1%。

販売元
AND 株式会社 **エーアンド・デイ**

本社: 〒170-0013 東京都豊島区東池袋3丁目23番14号
TEL.03-5391-6127 (直) FAX.03-5391-6129
■ 札幌出張所 TEL.011-251-2753 (代) FAX.011-251-2759
■ 仙台出張所 TEL.022-211-8051 (代) FAX.022-211-8052
■ 名古屋営業所 TEL.052-726-8763 (直) FAX.052-726-8769
■ 大阪営業所 TEL.06-7688-3904 (直) FAX.06-7688-3901
■ 広島営業所 TEL.082-233-0611 (代) FAX.082-233-7058
■ 福岡営業所 TEL.092-441-6715 (代) FAX.092-411-2815

<http://www.aandd.co.jp>

總代理



杏豐實業股份有限公司
SUN-UP HEALTH CARE CO., LTD.

www.sunup-hc.com.tw
服務專線: 02-66358858

* 使用時請參照使用說明書 * Copyright © 杏豐實業股份有限公司, All Rights Reserved.
* 本內容以官網公告為主, 如有更改不另行通知, 杏豐保留活動變更、終止之權利



A&D_AD6228-guideline-CHT-v.1.0