


使用手機APP即可輕鬆紀錄和管理結果

只需將手機靠近該設備，測量結果就會傳輸到APP中紀錄每次測量結果有助於了解血壓趨勢，並方便與醫生分享資訊。



只需將手機靠近設備，測量結果就會傳輸到APP中NFC是近場通訊(Near Field Communication)的縮寫，將血壓結果傳輸至APP時，請確認手機NFC功能是否開啟測量記錄結果以數字及圖示清晰顯示

掃描QR CODE下載APP

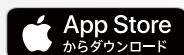

You Tube
使用教學影片



具有偵測
心房顫動的能力



UA-1100NFC 不只是血壓計，
更是被日本設計史紀錄的傑作

權威認證：

榮獲1952年成立、日本最具權威的JIDA
(日本工業設計協會)肯定。

館藏榮耀：

本產品獲選進入JIDA Design Museum，與時代經典並列，
代表當代工業設計的最高水準。

國際接軌：

JIDA 作為 WDO 國際組織成員，其審核標準嚴苛，
確保了產品在美學與功能上的國際視野。

三種顏色，完美融合生活日常

低調的色系可以融入任何生活場景也不會顯得格格不入三種
沉穩雅致的顏色，可像手機一般日常攜帶，適合所有年齡和
性別。



UA-1100NFC(WH)

UA-1100NFC(PL)

UA-1100NFC(GY)


A&D
A&D Medical

隨時隨地 輕鬆使用
手臂式無線電子血壓計
UA-1100NFC



體積只有傳統手臂式血壓計的三分之一 方便攜帶，任何場所皆能快速取用

由於本設備可以收納的很小巧，隨身攜帶也沒有問題，即使在日常生活的短暫休息時間、出差旅遊等，也可以輕鬆量測血壓，這有助於了解血壓的日夜變化。

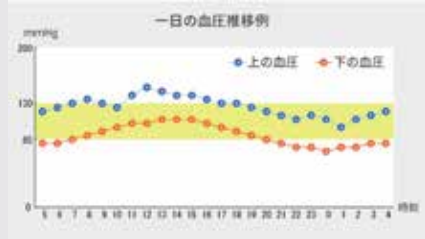

血壓並非始終恆定，
一天中會不斷波動。



工作空閒時間

旅遊或長期外出



尺寸小巧可隨身攜帶



隨時隨地，任何人都能輕鬆使用



只需將設備戴在手臂上，調整至心臟高度，然後按下按鈕即可沒有其他複雜的設置，一鍵即可輕鬆測量。



1. 將本設備戴在手臂上



2. 按下開始鍵



3. 顯示測量結果



4. 可自行抄入結果或透過NFC傳送至手機APP

小巧但易於閱讀的螢幕



同時顯示收縮壓、舒張壓和脈搏
螢幕雖小，但將數字放到最大，設計簡單明瞭

無線設計

易於使用和收納，讓每天測量血壓變得輕鬆簡單
壓脈帶上附有鬆緊帶，可輕鬆將本設備折疊收納



COMPACT!



產品規格

型號	UA-1100NFC
測量方法	示波測量
測量範圍	壓力：0~299mmHg 收縮壓：60~279mmHg 舒張壓：40~200mmHg 脈搏：40~180 次/分鐘
測量精度	壓力：±3mmHg 脈搏：±5%
電源	3 x 1.5V 電池(LR03 or AAA)
測量次數	若使用LR03 鹼性電池，室溫23°C， 壓力值170mmHg，大約可測量400 次。
分類	內部供電ME(醫電)設備 連續操作模式
EMD	IEC 60601-1-2: 2014+A1: 2020
無線通訊方式	NFC-V (數據含:收縮壓、舒張壓、脈搏)
操作條件	+10 至+40°C / 15 至85% RH / 800 至1060 hPa
運輸/儲存條件	-20 至+60°C / 10 至95% RH / 700 至1060 hPa
觸身部分最高溫度	低於 48°C
尺寸	寬 36 (mm) x 高 144 (mm) x 深 31 (mm)
重量	約240 g (不含電池)
防觸電保護	BF 標誌-壓脈帶
產品內含*1	血壓計一台、使用說明書一份、電池三顆
IP 防護等級	IP22

*1 請確認所有產品內含配件齊全，以確保本產品能夠安全、如預期運作。

備註

1. IP 防護等級是根據IEC 60529 標準對外殼提供的防護等級進行劃分的。
本產品可防止直徑12 毫米或更大的固體異物（例如手指）進入。若本產品傾斜角度在15 度以內，則可防止水滴落

製造業者名稱: (O) A&D Company, Limited (P) A&D Electronics (Shenzhen) Co., Ltd.
製造業者地址: (O) 3-23-14, Higashi-Ikebukuro, Toshima-ku, Tokyo 170-0013 JAPAN
(P) 1-5/F, Building #4, Hengchangrong High Tech Industry Park,
Shangnan East Road, Hongtian, Shajing, Bao'an District, Shenzhen,
Guangdong, 518125, China

醫療器材商名稱: 杏豐實業股份有限公司
醫療器材商地址: 臺北市中正區中華路1段59號10樓之1

衛部醫器陸輸字第001893號 北市衛器廣字第115060082號

總代理

 杏豐實業股份有限公司 www.sunup-hc.com.tw
SUN-UP HEALTH CARE CO., LTD. 服務專線: 02-66358858

* 使用時請參照使用說明書 *Copyright © 杏豐實業股份有限公司, All Rights Reserved.
* 本內容以官網公告為主，如有更改不另行通知，杏豐保留活動變更、終止之權利